


规格: 375\*105mm(平铺) 75\*105mm(折后)


工艺: 双面印刷/风琴折

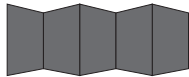

P/N:110401110816X


# 用户手册

## ET30A/ET30B 红外测温仪

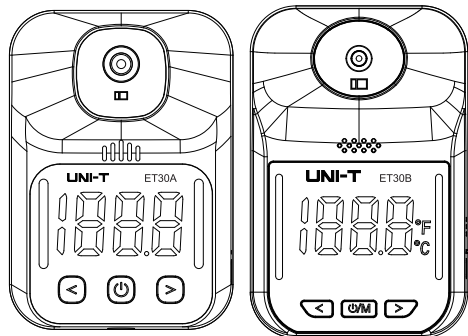

使用前请仔细阅读说明书


### 介绍

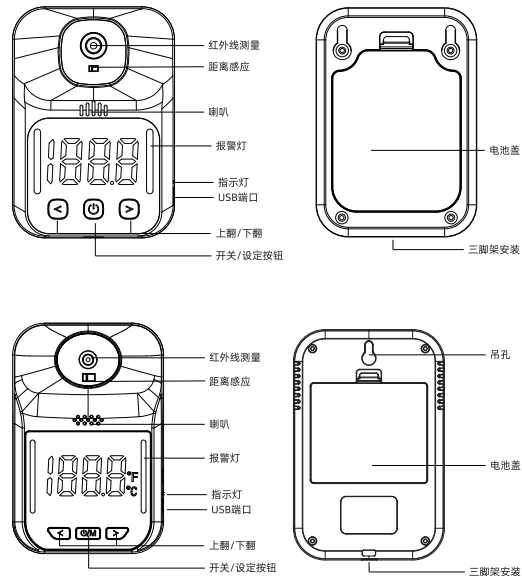

### 参数表


型号	ET30A	ET30B
精度	±0.2°C (放置在工作环境30分钟后测量)	
报警功能	异常自动报警, 闪光+声音报警约5秒	
测量距离	1cm-10cm自动测量	
环境温度	0°C-50°C (推荐15°C-35°C)	
测量范围	32°C-42°C (体表测量模式)	
响应时间	0.5s	
数据存储	支持118组测量数据存储、回看及清除	
显示	数字显示	
接口	Micro USB	
电源	USB供电/锂电池供电\3节5号干电池供电	
安装方法	三脚架固定, 挂孔安装	
语言	4种中文语音播报	16种语言播报
尺寸	107mm×75mm×80.5mm	145mm×95mm×110mm

### 状态说明

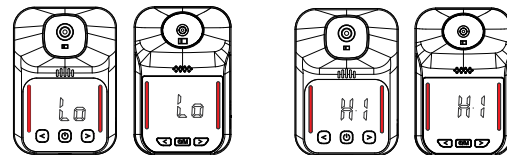

'Lo': 温度低于32°C  
两侧红灯闪烁并播报“请重新测量”

'Hi': 温度高于42°C  
两侧红灯闪烁并播报“请重新测量”

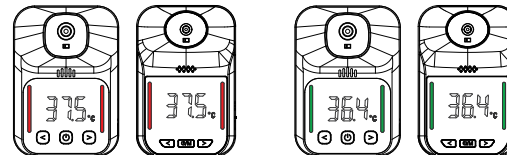


温度异常: 两侧红灯连续闪烁, 并带有播报音提示

常温: 两侧绿灯闪烁并播报“温度正常”


### 操作指令

1, 开关及复位:  
按下开关按钮, 机器启动成功;  
长按2秒开关按钮, 关机成功;  
长按开关按钮9秒直到显示“37.5°C”此时恢复到默认37.5°C报警及LO模式。

2, 历史温度查询:  
左右键查看历史温度数据, 最多支持118组回看。  
先显示回看温度序号, 再显示对应序号的温度。

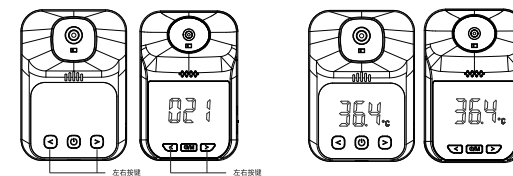

3, 历史数据清零:  
历史温度查看后, 长按左键或右键2秒, 此时屏幕显示“CLR”, 待屏幕中间显示3横杠时, 说明温度数据清除完成, 可短按开关/设定按钮或等待10秒自动退出。

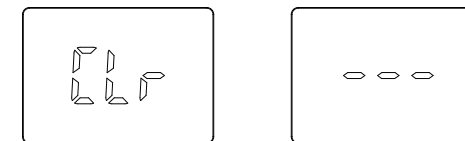


#### 4, 退出菜单设定方法:

- (1) 设置完成后长按开关/设置按钮退出;
- (2) 无操作10秒后自动退出。

#### 5, 温度测量:


距离传感器1-10cm, 以测量温度。

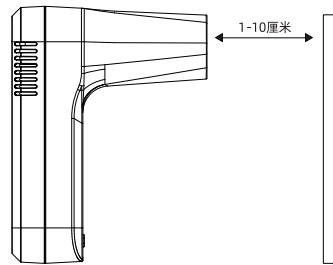

### 菜单设定


#### 1, 语言设置:

ET30A: CH/CH1/CH2/CH3:中文  
ET30B: EN:英语 It:意大利语 Hr:韩语 SP:西班牙语 JP/JP1:日语  
Ul:越南语 Cb:柬埔寨语 ml:马来语 rt:印尼语 Ar:阿拉伯语  
tl:泰语 PL:波兰语 dl:蜂鸣器音效“滴” CH/CH1/CH2/CH3:中文

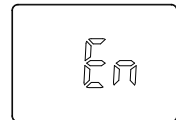


#### 2, 温度单位设置:

短按菜单键2次, 进入温度单位设定, 左右键切换摄氏度和华氏度。  
注:ET30A没有单位切换功能

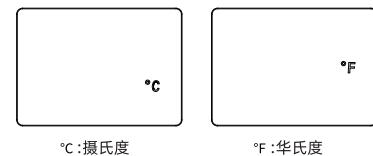


#### 3, 音量设置:

短按菜单键3次(ET30A只需按2次), 进入音量大小设定默认V0  
左右键调节音量大小, 从V00—V05 V00无声 V05最大

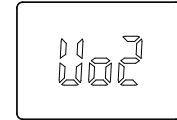


#### 4, 模式设置:

短按菜单4次(ET30A只需按3次), 进入测量模式设定,  
左右键切换测量模式

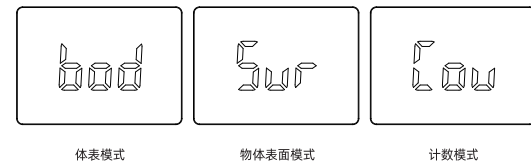


#### 5, 报警温度设置:

短按菜单键5次(ET30A只需按4次), 进入报警温度设定  
左右键可在报警温度36.0-38.0之间切换, 默认为37.5°C  
温度播报仅在体表模式下有效。

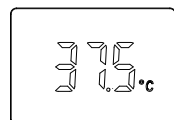


#### 6, 自动关机设置:

短按菜单键6次(ET30A只需按5次), 左右键切换是否12小时自动关机, 默认12小时自动关机

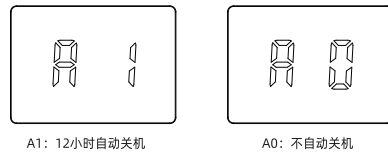

#### 7, 超低温设置:

短按菜单键7次(ET30A只需按6次), 左右键切换nor/Lo默认nor。

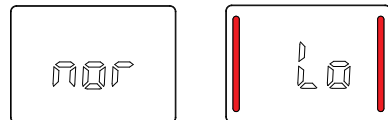


常规模式  
支持低温环境下测量。

体表模式下低于32度时,  
显示Lo和红灯, 并播报  
“请重新测量”

#### 8, 音效设置:

短按菜单键8次(ET30A只需按7次), 左右键切换语音播报前音效D1/D0。

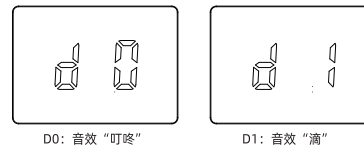


主机	1pcs
USB线	1pcs
电池	3×AA 5号电池
彩盒	1pcs
说明书	1pcs
保修卡	1pcs


### 温馨提示

- 1.用户有责任确保设备的电磁兼容环境, 以使设备正常工作。
- 2.更改操作环境时, 必须让设备静置30分钟以上。
- 3.眼镜和头发会影响红外线。测量时, 请摘下眼镜, 额头与传感器头对齐。
- 4.在户外使用时, 请避免阳光直射。
- 5.远离空调, 风扇等。
- 6.为节省电力, 机器将在12小时无操作后自动关闭。
- 7.请使用合格、有安全认证的电池, 并按照极性正确安装, 电池不合格或装反会导致产品损坏。
- 8.请在电量不足时及时更换新电池。
- 9.寒冷天气请在室内环境使用, 请镜头靠近测量。

### 安装方法:

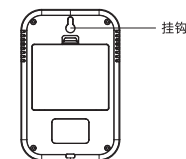

电池安装:  
打开电池盖, 然后根据电池极性  
正确安装新电池。

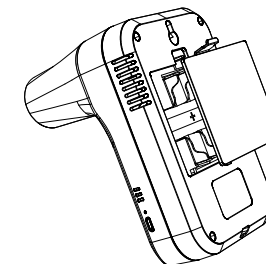

### 优利德

优利德科技(中国)股份有限公司

地址: 广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号  
电话: (86-769) 8572 3888  
邮编: 523 808  
http://www.uni-trend.com.cn

